

CYTOLIQ

CYTOBASE – DILUENTE GINECOLÓGICO

Código	CY-11-20601	1 L
	CY-11-20602	5 L
	CY-11-20601AM	50 ml

- Validade e lote do produto : ver frasco
- Temperatura de armazenamento : ambiente (não congelar)

Aplicações conhecidas

Solução destinada para ressuspender sedimento em procedimentos de citologia em base líquida. Produto validado em humano, não testado em outras espécies.

Especificações:

Álcool etílico, metilparabeno e cloreto de sódio que protege as células durante o dessecamento.

Armazenagem e estabilidade:

Armazenar em embalagem original, em temperatura ambiente (15 – 30°C) e ao abrigo de luz solar. O conteúdo permanece estável até a data de vencimento indicada no rótulo do produto desde que obedecidas às condições de armazenamento.

Conteúdo:

1. Solução para ressuspender sedimento celular.

Composição:

Álcool etílico, metilparabeno e cloreto de sódio.

Cuidados e Precauções

As soluções alcoólicas são inflamáveis e irritantes para os olhos, vias respiratórias e pele. Conservar longe de qualquer fonte de ignição – não fumar. Usar vestuário de proteção e luvas adequadas. Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente um médico (mostrar-lhe o rótulo se possível). Órgãos alvo: Olhos e nervos.

Ao manusear produtos químicos, siga sempre as normas de segurança empregadas em seu laboratório. Utilize obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual (EPI's) para sua segurança, como óculos de proteção, jaleco manga longa, luvas, respirador, sapatos fechados, etc.

Armazenagem e estabilidade

Armazenar em embalagem original, em temperatura ambiente (15 – 30°C) e ao abrigo de luz solar. O conteúdo permanece estável até a data de vencimento indicada no rótulo do produto desde que obedecidas às condições de armazenamento. Armazenagem em baixas temperaturas podem ocasionar precipitações.

Observações

Este produto é indicado apenas para uso laboratorial.

INSTRUÇÕES GERAIS

Para a obtenção de um melhor resultado da metodologia e uma completa compreensão da terminologia utilizada, nós recomendamos as seguintes indicações:

Influenciadores e dicas na fixação

- Temperatura, deve permanecer em temperatura ambiente.
- Caso necessário utilize a tampa para auxiliar no destacamento da ponta da escova cervical, porém a escova Cytoliq possui um sistema auxiliar para destacar a ponta.
- Coloque a ponta destacada diretamente no frasco.
- A média de uso no exame de citologia em meio líquido é de 3ml, suficiente realizar diversos exames, inclusive exames de biologia molecular.

CYTOLIQ

Validade

Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partir de sua fabricação, se armazenado adequadamente. Cada frasco possui uma etiqueta com identificação do lote e data de vencimento.

Garantia Grupo Erviegas

O Grupo Erviegas garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para mais informações sobre o produto ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site www.grupoerviegas.com.br.