

# CYTOLIQ

## SOLUÇÃO FIXADORA GINECOLÓGICA

Código	CY-11-20671	Frasco POP Ginecológico, 12ml, 50und
	CY-11-20671P	Frasco POP Ginecológico Personalizado, 12ml, 50und
	CY-11-20671PR	Frasco POP Personalizado RekBio, 12ml, 50und
	CY-11-20681	Cytoliq - Frasco PREMIUM Ginecológico, 20ml, 50und
	CY-11-20681AM	Amostra Frasco PREMIUM Ginecológico, 20ml, 1und
	CY-11-20681P	Frasco PREMIUM Ginecológico Personalizado, 20ml, 50und
	CY-11-20681PR	Frasco PREMIUM Ginecológico Personalizado e RekBio, 20ml, 50und

### Kit Coleta Cytoliq

Código	CY-41-20661P	Kit coleta Cytoliq Ginecológico Personalizado, frasco POP ginecológico 12ml + escova cervical CytoPro, Kit c/ 200und
	CY-41-20661PR	Kit coleta Cytoliq Ginecológico Personalizado e RekBio, frasco POP 12ml + escova cervical CytoPro, Kit c/ 200und
	CY-41-20662	Kit coleta Cytoliq Ginecológico, frasco PREMIUM 20ml + escova cervical CytoPro, Kit c/ 200und
	CY-41-20662P	Kit coleta Cytoliq Ginecológico Personalizado, frasco PREMIUM ginecológico 20ml + escova cervical CytoPro, Kit c/ 200und
	CY-41-20662PR	Kit coleta Cytoliq Ginecológico Personalizado e RekBio, frasco PREMIUM 20ml + escova cervical CytoPro, Kit c/ 200und

- Validade e lote do produto : ver frasco
- Temperatura de armazenamento : ambiente (não congelar)

### Aplicações conhecidas

A solução de preservação celular, a base de álcool é indicado para fixar a citologia ginecológica para análise em citologia em meio líquido e biologia molecular. Produto validado em humano, não testado em outras espécies.

A fixação preserva as características morfológicas das células.

### Especificações:

A Solução Fixadora Ginecológica Cytoliq pode ser utilizada em qualquer dispositivo de preparação citológica (sistema aberto).

### Conteúdo:

1. Solução de preservação celular

### Composição:

Álcool etílico, metilparabeno e cloreto de sódio.

### Cuidados e Precauções

As soluções alcoólicas são inflamáveis e irritantes para os olhos, vias respiratórias e pele. Conservar longe de qualquer fonte de ignição – não fumar. Usar vestuário de proteção e luvas adequadas. Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente um médico (mostrar-lhe o rótulo se possível). Órgãos alvo: Olhos e nervos.

Ao manusear produtos químicos, siga sempre as normas de segurança empregadas em seu laboratório. Utilize obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual (EPI's) para sua segurança, como óculos de proteção, jaleco manga longa, luvas, sapatos fechados, etc.

### Armazenagem e estabilidade

Armazenar em embalagem original, em temperatura ambiente (15 – 30°C) e ao abrigo de luz solar. O conteúdo permanece estável até a data de vencimento indicada no rótulo do produto desde que obedecidas às condições de armazenagem. Armazenagem em baixas temperaturas podem ocasionar precipitações.

### Observações

Este produto é indicado apenas para uso como fixador celular. O tempo sugerido de fixação a partir de 3 horas ou conforme recomendações do laboratório.

# CYTOLIQ

A escova cervical é estéril e descartável, com sistema de liberação da ponta para ser depositada dentro do frasco com a solução fixadora.

## INSTRUÇÕES GERAIS

Para a obtenção de um melhor resultado da metodologia e uma completa compreensão da terminologia utilizada, nós recomendamos as seguintes indicações:

### Influenciadores e dicas na fixação

- Temperatura, deve permanecer em temperatura ambiente.
- Caso necessário utilize a tampa para auxiliar no destacamento da ponta da escova cervical, porém a escova Cytoliq possui um sistema auxiliar para destacar a ponta.
- Coloque a ponta destacada diretamente no frasco.
- A média de uso no exame de citologia em meio líquido é de 3ml, suficiente realizar diversos exames, inclusive exames de biologia molecular.

### Validade

Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partir de sua fabricação, se armazenado adequadamente. Cada frasco possui uma etiqueta com identificação do lote e data de vencimento.

### Garantia Grupo Erviegas

O Grupo Erviegas garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para mais informações sobre o produto ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site [www.grupoerviegas.com.br](http://www.grupoerviegas.com.br).

**MS 10039370007**