

Potencializador de coloração do DAB

DAB Color Enhancer

Código	EP-12-20546AM	5ml
	EP-12-20546	25ml
	EP-12-20547	125ml

- Validade e lote do produto : ver frasco

Aplicações conhecidas

Para aplicações em imuno-histoquímica.

Especificações:

O potencializador do DAB altera a coloração amarronzada para uma coloração negra destacando a visualização do DAB.

Armazenagem e estabilidade:

Armazenar entre 2°C e 8°C, porém o uso é feito em temperatura ambiente. Armazenar ao abrigo de luz.

Preparação

Pronto para uso.

Protocolo:

- Adicione a mistura DAB à seção de tecido, seguindo o protocolo de rotina.
- Após a coloração DAB, lavar com TBS, depois com água deionizada/destilada e secar a lâmina com papel macio.
- Adicione 2-4 gotas de potencializador do DAB até que a seção de tecido esteja completamente coberta. Incubar por 2 minutos em câmara escura. Lavar com TBS, depois com água deionizada/destilada e secar a lâmina com papel macio.
- Hematoxilina EasyPath por 1 minuto e lavar em água corrente por 1 minuto.
- Bateria de álcool e xilol.
- Montar a(s) lâmina(s).

Notas técnicas importantes:

- A solução DAB é sensível a luz. Antes de fazer a mistura, tenha certeza que não existe incidência de luz diretamente na solução.
- O tempo de estabilidade após o preparo da solução é de seis horas, tempo suficiente para utilização deste cromógeno em sistemas automatizados.
- Coloração final. A metodologia foi padronizada a uma temperatura média de 20°C e em condições normais de trabalho, utilizando-se os produtos indicados nesta literatura. Pode ocorrer uma pequena variação na coloração final, devido principalmente a variação da temperatura, ocorrendo esta variação, deve-se alterar o tempo utilizado em cada reagente, com o objetivo de intensificar ou diminuir a coloração.
- Validade. Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partir de sua fabricação, se armazenado adequadamente. Cada Kit possui uma etiqueta com identificação do lote e data de vencimento.

Garantia Grupo Erviegas

O Grupo Erviegas garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para mais informações sobre o produto ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site www.grupoerviegas.com.br.

MS: 10039370003